

BVA FREE

GEBRAUCHSANWEISUNG

Gebrauchsanweisung // Einteiliges Beutelsystem

Version 00001-16, 1. Februar 2016

ALLGEMEIN



Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam, weil Sie wichtige Informationen über die Anwendung Ihrer GhM®-Produkte enthält.

INDIKATION

Der BAO Free ist ein einteiliges Stomabeutel-System, das für das Auffangen von Ausscheidungen aus einem Stoma bestimmt ist. Als einteiliges Stomabeutel-System integriert der BAO Free Hautschutz und den Stomabeutel und ermöglicht eine Anpassung an die individuellen Gegebenheiten. Die auf der das Stoma umgebenden Hautfläche haftende Hautschutzplatte besteht aus den hautfreundlichen und hypoallergenen Naturstoffen Carboxymethylcellulose, Pektin, Gelatine und dem synthetischen Polyisobutylen. Die Hautschutzplatte kann Feuchtigkeit absorbieren und transpirieren.


INFORMATION

Vor der Anwendung des BAO Free sollten Sie folgendes beachten:

- die Öffnung der Hautschutzplatte muss im Durchmesser genauso groß wie ihr Stoma sein und darf das Stomagewebe nicht überlappen oder quetschen;
- das Stoma sollte gereinigt werden, idealerweise mit unsterilen Kompressen und Wasser;
- die Haut um das Stoma sollte bei der Anlage der Hautschutzplatte nicht feucht sein;
- das BAO Free Stomabeutel-System sollte Raumtemperatur haben (und nicht im kühlen Zustand angelegt werden).

ANDERE MATERIALIEN, DIE GEGEBENENFALLS ERFORDERLICH SEIN KÖNNEN, SIND:

- Kompatible Abdichtungsmaterialien z. B. Hautschutzringe
- Schere, evtl. Einmalrasierer
- Vlieskompressen zur Reinigung
- Einmalhandschuhe, Händedesinfektionsmittel
- Abwurf / Abfallbeutel zur Entsorgung des Stomabeutel-Systems

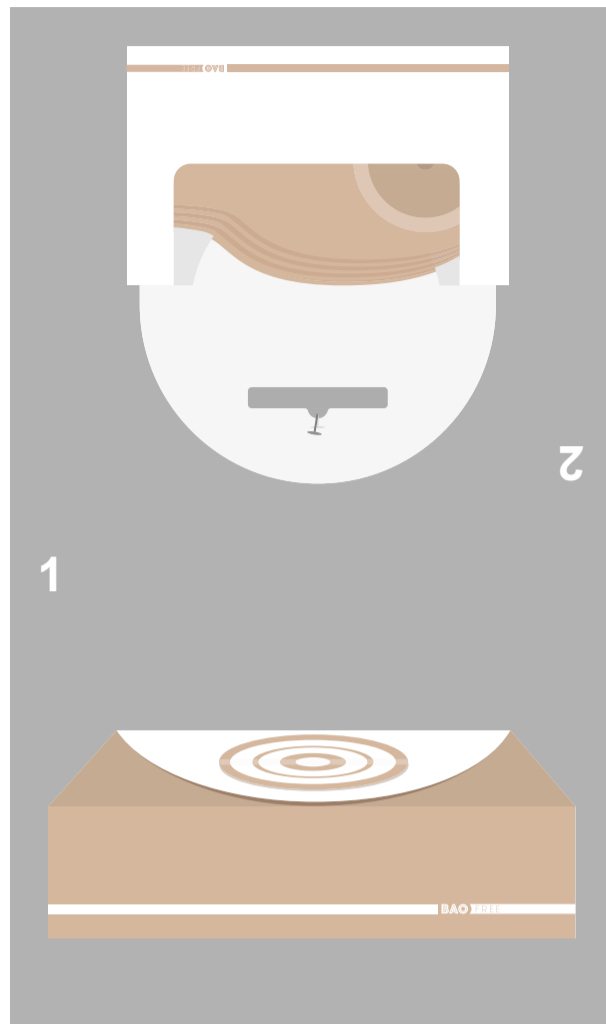

GEBRAUCHSANWEISUNG

BAO FREE

Verpackung

Da uns Ihr Wohlbefinden sehr am Herzen liegt, haben wir nicht nur bei den Produkten darauf geachtet, dass sie den höchsten Qualitätsansprüchen gerecht werden. Wir haben auch bei der Verpackung großen Wert auf Funktionalität und Ästhetik gelegt, um Ihnen Ihren Alltag zu erleichtern und auch zu verschönern. Sie können die Produkte-Box entweder klassisch als Box aufstellen und über die Flügelöffnung die Stomabeutel einzeln entnehmen (Abb. 1). Oder aber die platzsparende und für eine schnelle Entnahme optimale Lösung der Wandhalterung nutzen (Abb. 2). Klappen Sie hierzu einfach den Deckel und die Kreisflügel nach oben und nutzen Sie die Öffnung als Aufhängevorrichtung. Trennen Sie dann an der Rückseite die perforierte Fläche ab und schon können Sie schnell und einfach einen Beutel nach dem anderen entnehmen.



GESELLSCHAFT
FÜR HOCHWERTIGE
MEDIZINPRODUKTE



GhM GmbH
Hans-Sachs-Str. 36
50931 Köln



Web www.ghm-medizinprodukt.de
Mail info@ghm-medizinprodukt.de
Tel 0800 - 58 89 67 61
Fax 0800 - 58 89 67 62



Die Lagerung des BAO Free Stomabeutel-Systems sollte waagrecht erfolgen.



Ferner sollten kühle und trockene Orte zur Aufbewahrung gewählt werden.

Beim Auftreten von allergischen Reaktionen kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt oder Ihren Stomatherapeuten.

GhM schließt jede Haftung für Verletzungen und Schäden aus, die im Zusammenhang mit einer der Gebrauchsanweisung nicht entsprechenden Anwendung auftreten können.


WARNHINWEIS



Das BAO Free Stomabeutel-System ist zur „einmaligen“ Anwendung bestimmt. Aus der mehrmaligen Anwendung ergeben sich mögliche Risiken für den Nutzer (Leckagen oder Hautirritationen). Eine Beeinträchtigung der Produkteigenschaften kann eintreten, wenn das BAO Free Stomabeutel-System gereinigt, desinfiziert, sterilisiert oder anders wiederaufbereitet wird.

VORBEREITUNG

// Materialien zurecht legen, alte Versorgung entfernen und Haut reinigen

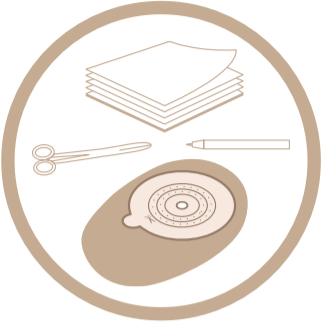

A Um gut vorbereitet zu sein, legen Sie sich alle Materialien, die Sie gleich brauchen werden, schnell griffbereit zurecht.



B Entfernen Sie den gebrauchten Stoma-Beutel, indem Sie mit der einen Hand die Haut oberhalb des Stomas leicht fest halten und mit der anderen Hand den Hautschutz vorsichtig von oben nach unten abziehen.



C Reinigen Sie die Haut um das Stoma mit Wasser und einer unsterilen Kompresse (am besten mit einer Vlieskompresse) und trocknen Sie diesen Bereich danach gründlich.

// Schablone anfertigen und passende Öffnung ausschneiden



D Ziehen Sie die transparente Schablonen-Folie mit den Maßeinteilungen von der Hautschutzplatte des Stomabeutels ab. Legen Sie diese Folie auf das Stoma und zeichnen Sie den Umriß des Stomas genau nach.



E Legen Sie die Schablone wieder zurück auf die Hautschutzplatte des Stomabeutels und schneiden Sie dann von innen her den von Ihnen markierten Bereich aus, so dass die neu ausgeschnittene Öffnung dann der Größe Ihres Stomas entspricht.

TIPP:

Merken Sie sich einfach die Größe des Durchmessers, die Sie auf der Schablone markiert haben oder heben Sie sich diese Schablone zur Erinnerung auf. So müssen Sie nur einmal Maß nehmen und können sich für die kommenden Anwendungen den Schritt D sparen und den Stomabeutel direkt zuschneiden.

ANWENDUNG

// Anbringung der neuen Versorgung



F Ziehen Sie die transparente Schablonenfolie von der Hautschutzplatte ab und entsorgen Sie die Folie.



G Legen Sie nun die Hautschutzplatte des Stomabeutels von unten beginnend an das Stoma. Ziehen Sie dann die leicht gebogene Hautschutzplatte vorsichtig nach oben, bis das Stoma vollständig eingeschlossen ist.



H Um den Stomabeutel gut zu fixieren, drücken Sie die Hautschutzplatte leicht an die Haut und streichen Sie diese von innen nach außen glatt. Fertig! Sie sind jetzt bestens versorgt.

TIPP:

Halten Sie die Ruheposition für einige Minuten nach der Anlage des Stomabeutel-Systems ein und drücken Sie den Hautschutz mit beiden Händen an. Dies unterstützt dessen Haftung.