

Quick Guide:


Stomagürtel - Verstärkt die Haftwirkung und bietet optimalen Halt

An der konvexen (gewölbten) BAO FREE Basisplatte befinden sich 2 Gürtelhalterungen.


Platzieren Sie die Basisplatte so auf der Haut, dass sich die Gürtelhalterungen auf der „3 Uhr -“ und gegenüberliegend auf der „9 Uhr - Position“ befinden, sodass ein Anbringen des Stomagürtels um den Bauch herum möglich ist.

Durch 2-3 minütiges Auflegen der Hand auf der Basisplatte, entfaltet der reine Hydrokolloid seine optimale Haftfähigkeit und passt sich der Hautstruktur ideal an. Nun können Sie den Stomagürtel an der Basisplatte befestigen.

Die Befestigung des Stomagürtels am Stomabeutel ist ebenfalls möglich. Jedoch ist dies nur sinnvoll, wenn der Halt ausreichend ist und eine Schiefelage des Beutels vermieden werden kann.

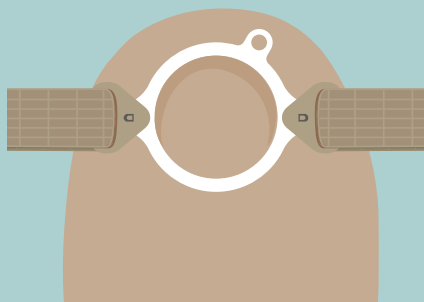

Beispiel 1:
Gürtelbefestigung - Beutel

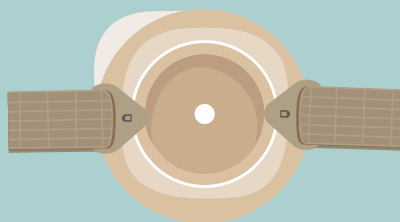

Beispiel 2:
Gürtelbefestigung - konvexe Basisplatte